

# MANUEL DE MONTAGE

## Table de Massage Fixe en Bois "Spa Deluxe"






Avertissements et précautions d'emploi	p03
<b>Section 1 : fiche technique</b>	<b>p04</b>
<b>Section 2 : outillage et instructions de montage</b>	<b>p05</b>
• Outillage	p05
• Instructions de montage	p06
<b>Section 3 : réglage du matelas et accessoires</b>	p10
• Matelas	p10
• Accessoires	p12
<b>Section 4 : entretien et garantie</b>	p16



## AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Un usage inapproprié de ce dispositif peut entraîner des blessures.
- Ne passez jamais sous la table ou sous sa structure : les risques de blessures liés à une chute de cette dernière existent.
- N'utilisez jamais une table qui ne serait incomplète, mal assemblée, ou dont les vis seraient desserrées.
- Ne retournez jamais la table sans prendre de précautions au préalable.
- Lorsque vous retournez la table, assurez-vous de la tenir par la structure en bois et non par le matelas.
- Contrôlez le rembourrage et le revêtement de la table dès l'ouverture. Ne l'utilisez pas si ceux-ci présentent des signes de détérioration. (Notre garantie n'inclut pas les dommages dus à une mauvaise installation, un accident, un excès ou une utilisation autre que celle à laquelle la table est destinée.)
- L'assemblage de cette table nécessite deux personnes.
- Assurez-vous que la table est stable avant d'y installer un patient.
- Ne jamais s'asseoir sur le dossier ou le repose-jambes lorsque ceux-ci sont inclinés
- Ne jamais s'asseoir sur les accoudoirs ou prendre appui dessus pour s'installer sur la table.
- Ne jamais faire reposer un poids important sur les accoudoirs ou la tête.
- Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle
- Un nettoyage à l'alcool dessèche le vinyle et engendre des fissures Limite de poids (incluant le poids du patient et des accessoires) : 400kg
- Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle.

# FICHE TECHNIQUE

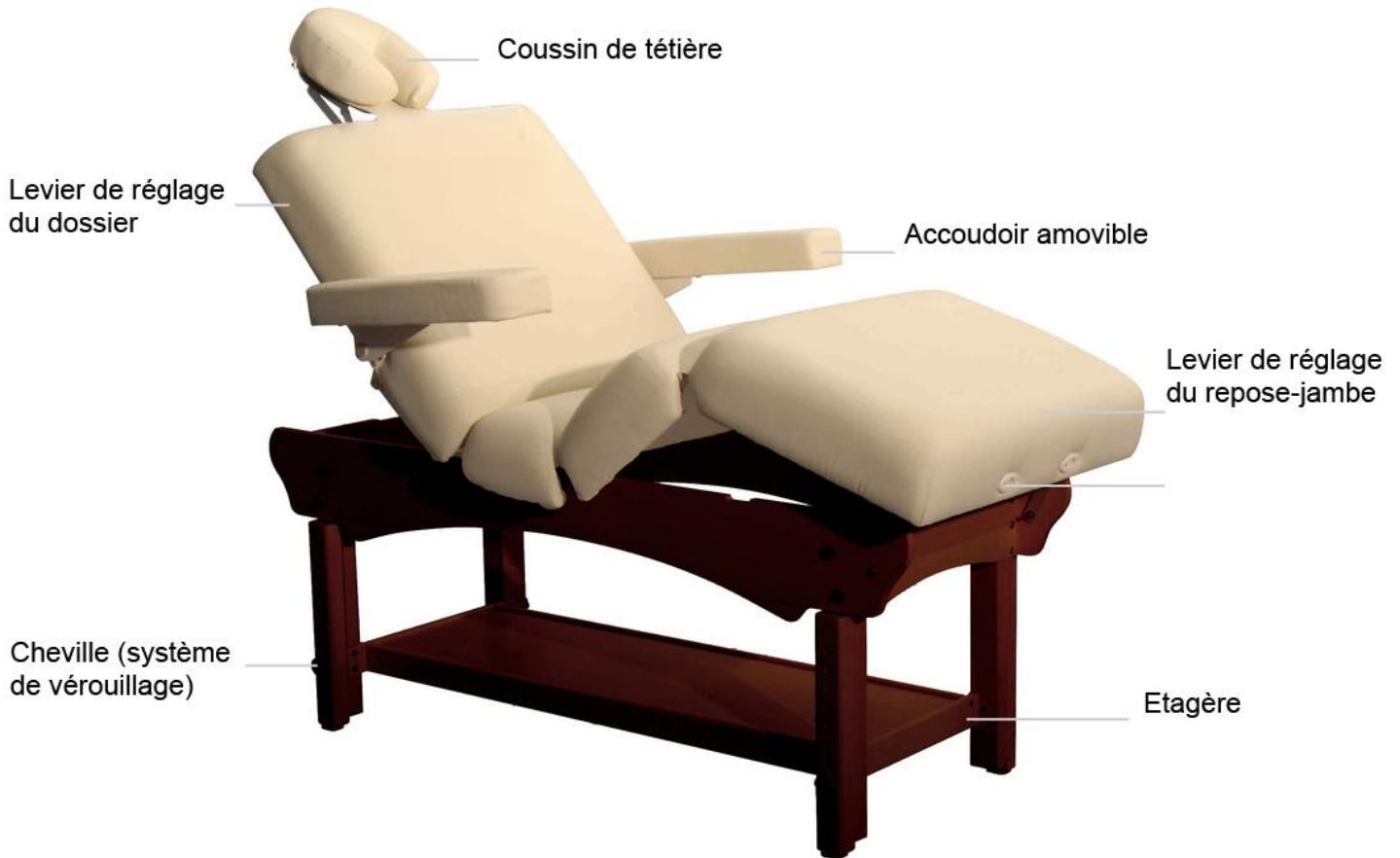

## DIMENSIONS :

- Table : 184cm X 71cm
- Table avec appuie-tête: 205cm X 71cm
- Hauteur ajustable: de 68cm à 80cm
- Epaisseur mousse : 9 cm
- Poids: 60Kgs
- Résistance au travail: 400 kg
- Résistance statique: 1200 kg

## ACCESSOIRES OFFERTS :

- Têteière multi-réglable
- Repose-bras amovible
- Accoudoirs amovibles
- Etagère de rangement spacieuse et amovible

## CARACTERISTIQUES :

- Coins arrondis
- Hauteur réglable
- Réglage hydraulique du matelas
- Revêtement en vinyle (résiste à l'huile et à l'eau)
- Qualité bois d'érable massif

# OUTILLAGE ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## OUTILLAGE :

Vous trouverez tous les outils et pièces nécessaires au montage dans le carton de la table.  
Vérifiez que vous avez reçu les bonnes quantités de chaque pièce.

Note : il se peut que certaines pièces soient présentes en quantité supérieure à celle indiquée sur la liste.

## Contenu du kit :



A : Vis 85 mm Ø 6 mm

B : Vis 75 mm Ø 9 cm

C : Vis 42 mm Ø 6 mm

D : Clé plate pour verrouillage

E : Clé allen

F : Chevilles pour verrouillage de la hauteur

G : Rondelles

H : Ecrous Ø 9 mm

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE :



Attention : l'assemblage de cette table nécessite deux personnes.

### Etape 1 :

Posez le matelas (revêtement en dessous) sur une surface plane. Assurez-vous que le sol soit parfaitement propre et qu'aucun objet pointu ne viendra endommager le revêtement. Vous pouvez utiliser une couverture afin de protéger ce dernier.



### Etape 2 :

Dépliez les pieds et ajustez-les en plaçant à chaque angle une vis noire grâce aux outils D et E (voir images ci-dessous).




Attention : Utilisez les bons outils




### Etape 3 :

Insérez une vis A dans chaque pied et serrez-la.

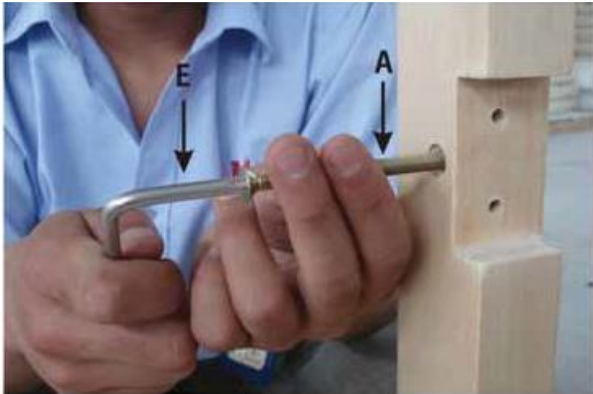

### Etape 4 :

Placez l'étagère dans les mortaises prévues à cet effet et serrez avec les vis C et la clé E (voir image ci-dessous)

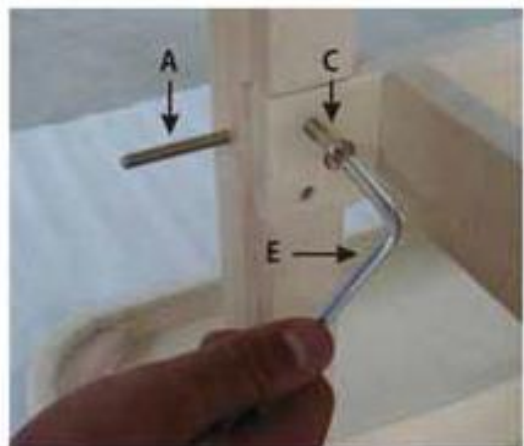


### Etape 5 :

Assembler les extensions des pieds aux parties principales, et ajustez la hauteur grâce aux chevilles de verrouillage.



Attention : Assurez-vous que la table est stable et que toutes les vis sont serrées au maximum avant d'y installer un patient.

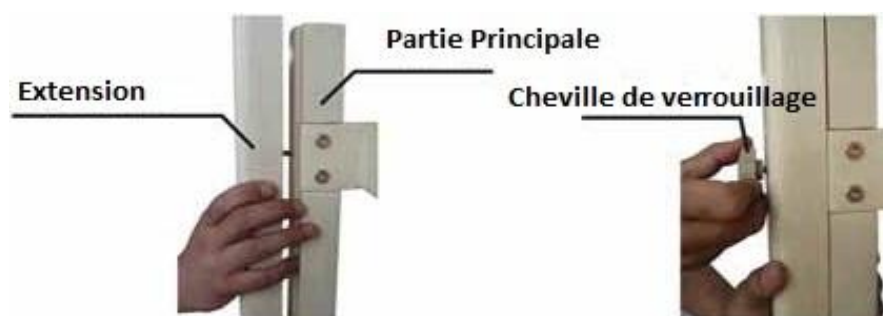

## Etape 6 :

### Installation du vérin hydraulique

1. Placez la partie en U du vérin à gaz dans l'encoche du support en métal.



2. Insérez la vis dans les trous du support en traversant l'encoche et la partie en U du vérin.



3. Bloquez la vis grâce au levier en métal.



4. Ajustez parfaitement la tête de vis et assurez-vous que le bouton poussoir du vérin reste attaché fermement au levier plat et que le câble reste en place.





### Etape 7 :

Vérifiez grâce aux instructions ci-dessus que toutes les pièces ont été assemblées et que les vis, écrous et rondelles sont parfaitement positionnés. Resserrez chaque vis et chaque écrou scrupuleusement.



Attention : Lorsque vous retournez la table, assurez-vous de la tenir par la structure en bois et non par le matelas.



Mauvaise méthode



Bonne méthode



Attention : Lorsque vous retournez la table, prenez garde à ce que le dossier et le repose-jambes soient en position horizontale.

# REGLAGE DU MATELAS ET DES ACCESSOIRES

## REGLAGE DU MATELAS :

La table Spa Deluxe possède un dossier et un repose-jambes réglables par vérin à gaz. Les leviers de réglage sont placés aux extrémités de la table.

Le réglage des différentes parties du matelas sera d'autant plus facile que le poids supporté par cette partie sera moindre.



Attention : Ne jamais s'asseoir sur le dossier ou le repose-jambes lorsque ceux-ci sont inclinés.


## Relever le dossier :

Relevez le dossier en actionnant le levier tout en exerçant une pression sur l'extrémité du dossier vers le haut jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.




**Abaisser le dossier :**

Actionnez le levier en retenant le dossier et abaissez-le jusqu'à que l'inclinaison souhaitée soit atteinte. Appuyez légèrement sur le dossier pour l'accompagner.

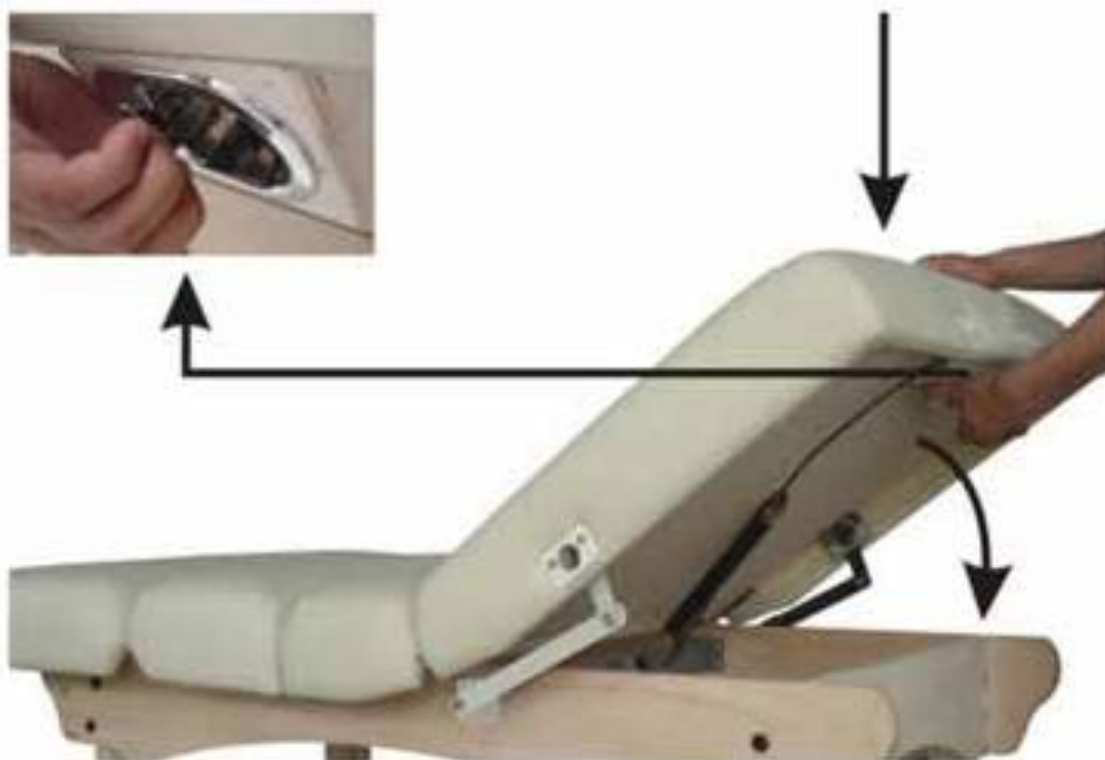

### Relever le repose-jambes :

Actionnez le levier et relevez le repose jambe en le tenant par le centre de l'extrémité du matelas jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.

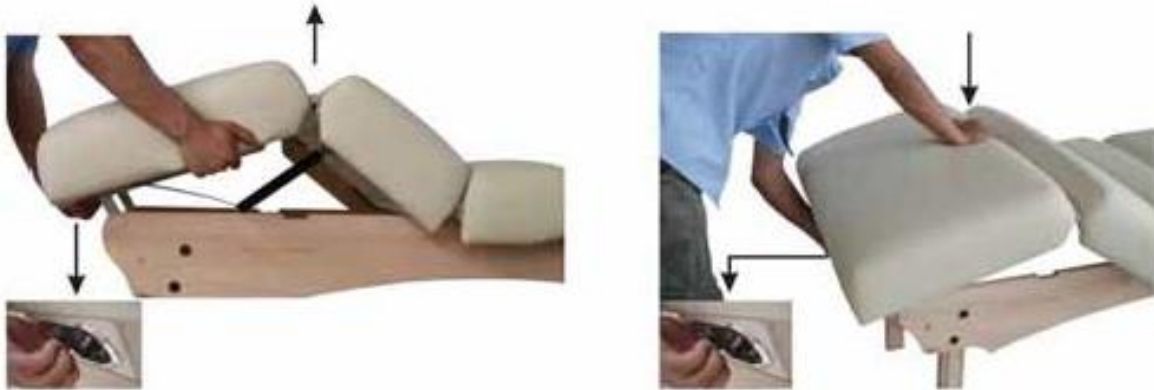

### Abaisser le repose-jambes :

Actionnez le levier et abaissez le repose-jambes en exerçant une pression sur le centre de l'extrémité du matelas jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte. Lorsque vous relâchez le levier, le repose-jambes restera en place.

## REGLAGE DES ACCESSOIRES

### 1. Accoudoirs :

Les accoudoirs sont amovibles afin d'améliorer la polyvalence de cette table. Leur réglage est rapide et simple.



Attention : Ne jamais s'asseoir sur les accoudoirs ou prendre appui dessus pour s'installer sur la table.



### **Installer les accoudoirs :**

Orientez l'accoudoir à 30° et insérez la tige perpendiculaire au nylon dans l'anneau en métal jusqu'à ce que l'accoudoir touche la table, puis abaissez-le jusqu'à ce qu'il reste en place.



### **Retirer les accoudoirs :**

Remontez les accoudoirs à l'angle correspondant et tirez-les vers l'extérieur.



## **2. Repose-bras :**

Pour un confort total de votre patient, vous pouvez mettre en place le repose-bras. Ce dernier peut également être retiré très facilement.

### **Mettre en place le repose-bras :**

Passez le support de la tête dans la lanière puis attachez l'extrémité du repose bras au velcro en haut du support de la tête. Positionnez alors le coussin de tête sur le support.



### Régler le repose-bras :

Le repose-bras se fixe grâce à une bande de velcro, afin de vous permettre d'ajuster la distance entre la tête et le repose bras. Il est possible que vous ayez besoin d'ajuster le repose-bras entre deux patients de corpulence différente.

Attachez le vinyle au velcro au sommet du support de tête puis posez le coussin sur le support.



Support de tête



Attache velcro



Coussin de tête

### 3. Tête



Attention : Ne jamais faire reposer un poids important sur la tête

### **Mettre en place la tête :**

Placez les tiges du support de la tête dans les œillets au bout de la table. Placez ensuite le levier de serrage horizontalement avec les strilles vers le haut et ajustez la tête comme vous le souhaitez. Poussez le levier vers le bas pour le verrouiller la tête.



### **Ajuster la tête :**

Vous pouvez très facilement ajuster la tête en desserrant les œillets. Lorsque vous avez atteint la position souhaitée, resserrez-les.

### **Retirer la tête :**

Desserrez le levier et tirez sur le support pour le retirer des œillets.

# ENTRETIEN ET GARANTIE

## ENTRETIEN DU REVETEMENT :

Nous vous félicitons pour l'achat de cette table. Afin de maintenir la qualité de nos produits et d'assurer une longue vie à votre table, nous avons testé différentes façons d'entretenir le revêtement de votre table et de vos accessoires.

Voici quelques suggestions d'entretien :

- Evitez d'exposer votre table à un froid excessif : cela pourrait causer des fissures dans le revêtement. Ne laissez donc pas votre table dans un endroit non couvert par temps froid.
- Evitez d'exposer votre table à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer et cloquer. Assurez-vous que votre table soit suffisamment éloignée de votre chauffe-eau et de vos des prises électriques, qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil, et ne la laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.
- Protégez votre table et vos accessoires à l'aide de couvertures et de housses. Nous vous proposons un ensemble couverture et housse 100% coton qui protégera votre table des taches d'huile, tout en procurant un grand confort à vos clients
- Nettoyez le revêtement de votre table tous les jours. Nous vous recommandons de la faire à l'aide d'un détergent doux, qui protégera le revêtement des taches d'huile et de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue
- La méthode la plus répandue consiste à mélanger une petite quantité de liquide vaisselle antibactérienne avec de l'eau dans un pulvérisateur. Vous pourrez nettoyer la table avec ce mélange, puis l'essuyer à l'aide d'une serviette humide.
- Pensez à utiliser les deux extrémités de la table. Changez régulièrement la tête de côté, afin d'éviter une usure inégale
- Protégez votre table de l'abrasion, des coupures et des piqûres

## GARANTIE :

Nous proposons sur la table Spa Deluxe une garantie cadres et montants de 10 ans, contre tout défaut ou malfaçon par le fabricant. Dans le cadre de la garantie, il vous suffit de contacter notre service client et nous vous ferons parvenir les pièces détachées afin de réparer votre table.

Les défauts ou détériorations provoqués par une utilisation anormale, un mauvais déballage (cutter, couteau, etc..), ou par l'usure naturelle sont exclus de la garantie.