

MANUEL D'UTILISATION

Table de Massage Pliante "Tempo »





Avertissements et précautions d'emploi	p03
Section 1 : fiche technique	p04
Section 2 : mise en place et rangement de la table	p05
• Mise en place	p05
• Rangement	p06
Section 3 : réglage du matelas et accessoires	p07
• Matelas	p07
• Accessoires	p08
Section 4 : entretien et garantie	p10



AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Un usage inapproprié de ce dispositif peut entraîner des blessures.
- Ne passez jamais sous la table ou sous sa structure : les risques de blessures liés à une chute de cette dernière existent.
- N'utilisez jamais une table qui ne serait incomplète, mal assemblée, ou dont les vis seraient desserrées.
- Ne retournez jamais la table sans prendre de précautions au préalable.
- Lorsque vous retournez la table, assurez-vous de la tenir par la structure et non par le matelas.
- Contrôlez le rembourrage et le revêtement de la table dès l'ouverture. Ne l'utilisez pas si ceux-ci présentent des signes de détérioration. (Notre garantie n'inclut pas les dommages dus à une mauvaise installation, un accident, un excès ou une utilisation autre que celle à laquelle la table est destinée.)
- Assurez-vous que la table est stable avant d'y installer un patient.
- Ne jamais s'asseoir sur le dossier lorsque celui-ci est incliné.
- Ne jamais faire reposer un poids important sur la tête.
- Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle
- Un nettoyage à l'alcool dessèche le vinyle et engendre des fissures Limite de poids (incluant le poids du patient et des accessoires) : 400kg
- Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle.

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS :

- Table : 185 X 71cm
- Table pliée : 92 x 20 x 71 cm
- Table avec appuie-tête: 214 X 71cm
- Hauteur ajustable : 57 à 79 cm
- Epaisseur rembourrage : 4 cm
- Epaisseur du matelas : 5,5 cm
- Poids (sans accessoires): 17 kg
- Résistance au travail: 204 kg
- Résistance statique: 1000 kg

ACCESSOIRES OFFERTS :

- Tête multi-réglable
- Repose-bras amovible
- Housse de transport
- Bouchon de cavité faciale

CARACTERISTIQUES :

- Coins arrondis
- Hauteur réglable
- Réglage mécanique du matelas
- Revêtement en vinyle (résiste à l'huile et à l'eau)

MISE EN PLACE ET RANGEMENT DE LA TABLE

Lorsque vous recevez votre table, tous les accessoires sont rangés à l'intérieur. Vous pourrez les remettre en place à chaque rangement de la table.

MISE EN PLACE DE LA TABLE :

Déplier la table :

Sortez la table de sa housse, et ouvrez les charnières. Posez la table au sol et ouvrez-la. Dépliez les pieds, ils continueront de se mettre en place automatiquement.




Ajuster la hauteur :

Dévissez la cheville de verrouillage, et faites coulisser la partie extérieure du pied sur la partie intérieure afin d'obtenir la hauteur désirée. Remplacez alors la cheville. Procédez de la même manière pour chaque pied




Attention : Assurez-vous que la table est stable et que toutes les vis sont serrées au maximum avant d'y installer un patient.

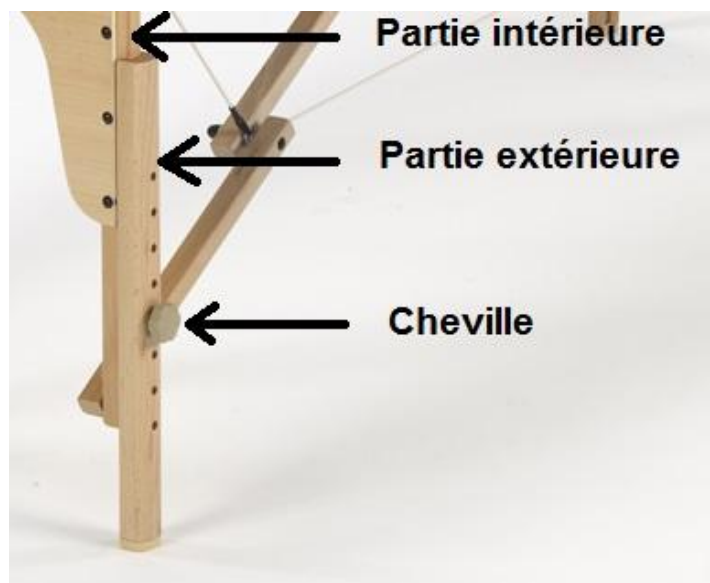

RANGEMENT DE LA TABLE :

Posez la table au sol et repliez les pieds. Vous pouvez appuyer légèrement sur le câble afin de le détendre. Rangez alors tous vos accessoires grâce aux élastiques placés sous la table.

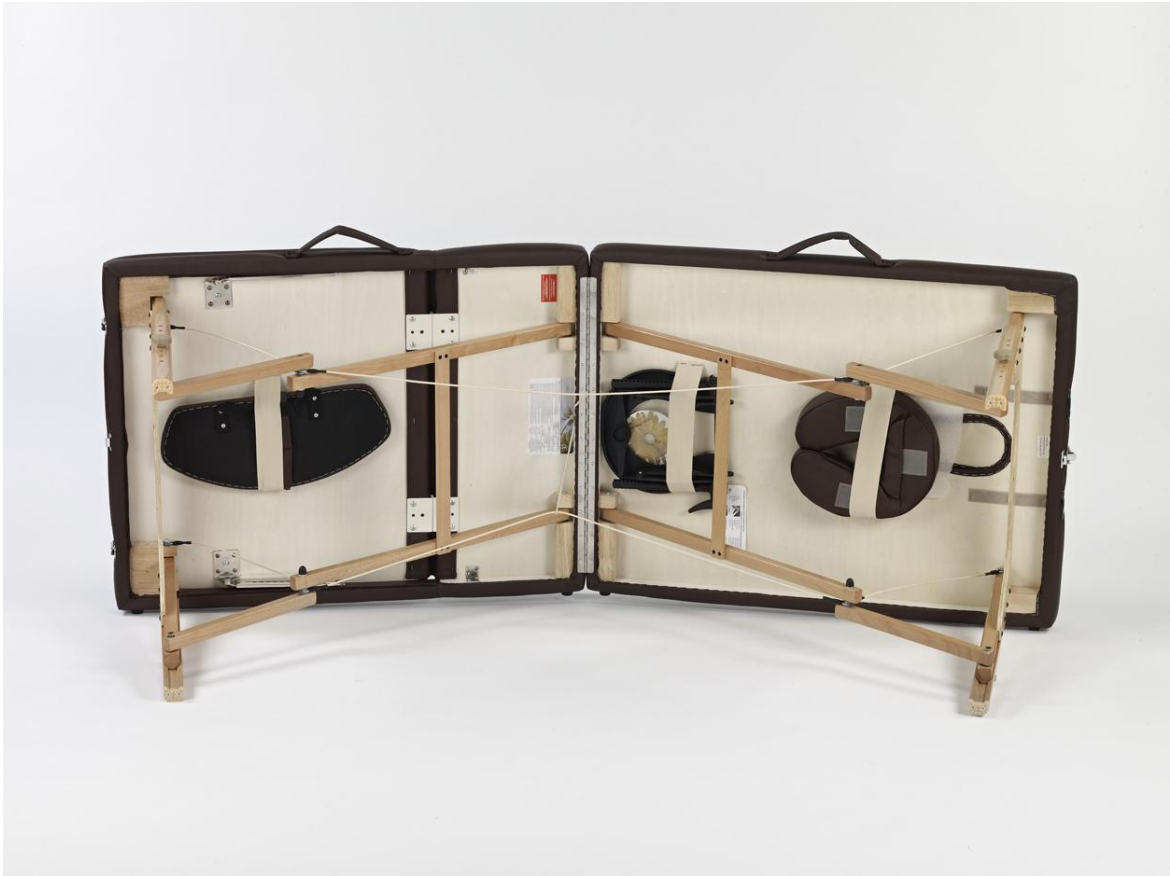

Remplacez ensuite la table dans sa housse de transport afin de la protéger.



REGLAGE DU MATELAS ET DES ACCESSOIRES

REGLAGE DU DOSSIER :

La table Tempo possède un dossier réglable mécaniquement.

Le réglage du dossier sera d'autant plus facile que le poids supporté par cette partie sera moindre.



Attention : Ne jamais s'asseoir sur le lorsque celui-ci est incliné.

Relever le dossier :

Relevez le dossier en exerçant une pression sur l'extrémité du dossier vert le haut jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.



Abaisser le dossier :

Exercez une pression au centre de l'extrémité du matelas en poussant le dossier au maximum vers l'avant, avant de le laisser redescendre. Accompagnez-le légèrement.



REGLAGE DES ACCESSOIRES

1. Repose-bras :

Pour un confort total de votre patient, vous pouvez mettre en place le repose-bras. Ce dernier peut également être retiré très facilement.

Mettre en place le repose-bras :

Passez le support de la tête dans la lanière puis attachez l'extrémité du repose bras au velcro en haut du support de la tête. Positionnez alors le coussin de tête sur le support.



Régler le repose-bras :

Le repose-bras se fixe grâce à une bande de velcro, afin de vous permettre d'ajuster la distance entre la tête et le repose bras. Il est possible que vous ayez besoin d'ajuster le repose-bras entre deux patients de corpulence différente.

Attachez le vinyle au velcro au sommet du support de tête puis posez le coussin sur le support.



Support de tête



Attache velcro



Coussin de tête

2. Têteière



Attention : Ne jamais faire reposer un poids important sur la têteière

Mettre en place la têteière :

Placez les tiges du support de la têteière dans les œillets au bout de la table. Placez ensuite le levier de serrage horizontalement avec les strilles vers le haut et ajustez la têteière comme vous le souhaitez. Poussez le levier vers le bas pour le verrouiller la têteière.



Ajuster la têteière :

Vous pouvez très facilement ajuster la têteière en desserrant les œillets. Lorsque vous avez atteint la position souhaitée, resserrez-les.

Retirer la têteière :

Desserrez le levier et tirez sur le support pour le retirer des œillets.

ENTRETIEN ET GARANTIE

ENTRETIEN DU REVETEMENT :

Nous vous félicitons pour l'achat de cette table. Afin de maintenir la qualité de nos produits et d'assurer une longue vie à votre table, nous avons testé différentes façons d'entretenir le revêtement de votre table et de vos accessoires.

Voici quelques suggestions d'entretien :

- Evitez d'exposer votre table à un froid excessif : cela pourrait causer des fissures dans le revêtement. Ne laissez donc pas votre table dans un endroit non couvert par temps froid.
- Evitez d'exposer votre table à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer et cloquer. Assurez-vous que votre table soit suffisamment éloignée de votre chauffe-eau et de vos des prises électriques, qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil, et ne la laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.
- Protégez votre table et vos accessoires à l'aide de couvertures et de housses. Nous vous proposons un ensemble couverture et housse 100% coton qui protégera votre table des taches d'huile, tout en procurant un grand confort à vos clients
- Nettoyez le revêtement de votre table tous les jours. Nous vous recommandons de la faire à l'aide d'un détergent doux, qui protégera le revêtement des taches d'huile et de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue
- La méthode la plus répandue consiste à mélanger une petite quantité de liquide vaisselle antibactérienne avec de l'eau dans un pulvérisateur. Vous pourrez nettoyer la table avec ce mélange, puis l'essuyer à l'aide d'une serviette humide.
- Pensez à utiliser les deux extrémités de la table. Changez régulièrement la tête de côté, afin d'éviter une usure inégale
- Protégez votre table de l'abrasion, des coupures et des piqûres

GARANTIE :

Nous proposons sur la table Tempo une garantie cadres et montants de 2 ans, contre tout défaut ou malfaçon par le fabricant. Dans le cadre de la garantie, il vous suffit de contacter notre service client et nous vous ferons parvenir les pièces détachées afin de réparer votre table.

Les défauts ou détériorations provoqués par une utilisation anormale, un mauvais déballage (cutter, couteau, etc..), ou par l'usure naturelle sont exclus de la garantie.